


ROHO Quadtro Select (5cm) ROHO 氣囊 式氣墊座(5 公分)使用方法

1. 將坐墊前方綠色旋鈕按壓，朝 
2. 坐墊前方右側為充氣洩氣閥(逆時針為旋開順時針為關閉)先將手動充氣幫浦插上充氣閥後再旋開，接著將坐墊氣充飽
3. 充飽氣後將手動幫浦抽離，接著以手按壓氣墊座前方左右兩側各 2X2 的氣囊至完全洩氣如下圖所示

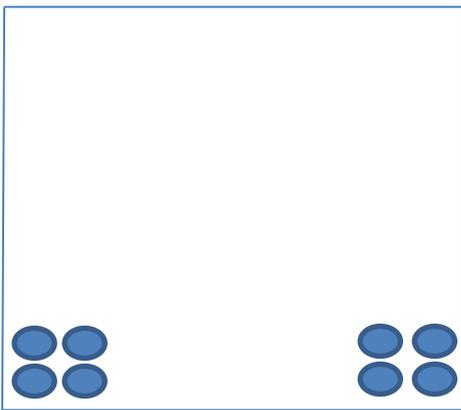

4. 確認完全洩氣後將充氣閥旋緊，即完成。
5. 此快速壓力調整方法為一般民眾使用方法，請在乘坐後檢查臀部皮膚情形，如有皮膚發紅不退請立即與專業治療師聯繫，以協助調整坐墊至適當壓力